




## УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отличительной особенностью нашей компании является возможность предоставить нашим партнерам не только качественные медицинские изделия, но и помощь в правильном подборе ИМН, готовим коммерческие предложения и технические задания, помогаем с подбором КТРУ и ОКПД2.

 г. Киров,  
ул. Дзержинского,  
д. 6, пом. 1017

 [Altarim.ru](http://Altarim.ru)  
[info@altarim.ru](mailto:info@altarim.ru)

 8(8332)46-41-31


# ШПРИЦ ПОТЕРИ СОПРОТИВЛЕНИЯ MEDEREN

Шприц потери сопротивления MEDEREN - одноразовый пластиковый шприц с низким коэффициентом трения. Используется для выполнения эпидуральной пункции.

В момент прохождения иглы через желтую связку давление, оказываемое на поршень механического шприца, дает ощущение сопротивления, которое исчезает при достижении иглы эпидуральной клетчатки, при этом поршень начинает легко продвигаться вперед. После обнаружения эпидурального пространства дальнейшее введение иглы приостанавливают и приступают к инъекции анестетика.



## ПОРЯДОК РАБОТЫ СО ШПРИЦЕМ ПОТЕРИ СОПРОТИВЛЕНИЯ:

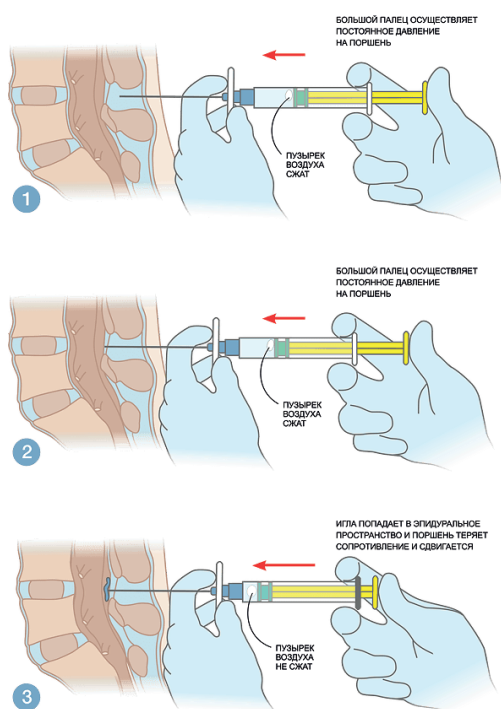

- Шприц заполняют воздухом или физиологическим раствором и присоединяют к игле, удерживая ее за крылья большим и указательным пальцами обеих рук.
- Большим пальцем другой руки нажимают на поршень шприца и медленно продвигают иглу в направлении эпидурального пространства, при этом происходит сжатие пузырька воздуха.
- В момент обнаружения эпидурального пространства происходит впрыскивание пузырька без сопротивления.
- Затем шприц отсоединяют и приступают к введению анестетика. Идентификация эпидурального пространства методом потери сопротивления с ручным механическим шприцем MEDEREN

Изготовлен шприц из прозрачного полипропилена, что позволяет визуальное контролировать ток жидкости. Имеет ограничитель «заднего» хода поршня и стандартный наконечник Луер. Изделие стерильное, для однократного использования.

### НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017  
Altarim.ru, info@altarim.ru  
8(8332)46-41-31