




УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отличительной особенностью нашей компании является возможность предоставить нашим партнерам не только качественные медицинские изделия, но и помощь в правильном подборе ИМН, готовим коммерческие предложения и технические задания, помогаем с подбором КТРУ и ОКПД2.

 г. Киров,
ул. Дзержинского,
д. 6, пом. 1017

 Altarim.ru
info@altarim.ru

 8(8332)46-41-31

СИСТЕМА ВНУТРИКОСТНОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА EZ-IO

По приказу МЗ РФ N 388н от 20 июня 2013 г. «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» система внутрикостного сосудистого доступа входит в стандарт оснащения: станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи), отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи больницы (больницы скорой медицинской помощи, центра медицины катастроф)



СИСТЕМА ВНУТРИКОСТНОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА EZ-IO

ОПИСАНИЕ EZ-IO:

Система для внутрикостного сосудистого доступа EZ-IO обеспечивает внутрикостный доступ на срок до 24 часов в острых или необходимых с медицинской точки зрения случаях, когда внутривенный доступ невозможно или трудно обеспечить.



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ EZ-IO

Система для внутрикостного сосудистого доступа EZ-IO включает в себя следующие компоненты:

- EZ-IO драйвер – 1 шт;
- Держатель для драйвера – 1 шт;
- Игла EZ-IO 45 мм – 5 шт;
- Игла EZ-IO 25 мм – 5 шт;
- Игла EZ-IO 15 мм – 5 шт;
- Набор для фиксации*

А также кейсы для хранения и транспортировки:

- Мягкий кейс – 1 шт;
- Твердый кейс – 1 шт.

*Каждый набор для фиксации содержит:

- Стерильные EZ-IO – иглы 15G;
- Фиксирующую повязку EZ-Stabilizer;
- Удлинительную инфузионную линию EZ-Connect;
- Браслет для пациента EZ-IO;
- Защитный наконечник NeedleVISE;
- 1 порт для острых предметов.

СИСТЕМА ВНУТРИКОСТНОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА EZ-IO

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИНФУЗИИ

Соответствует перечню средств, предназначенных для введения в периферическую вену. Следует соблюдать особую осторожность при длительном введении цитотоксических препаратов и гипертонических растворов.



ПРЕИМУЩЕСТВА EZ-IO

- Легко использовать у пациентов любого возраста;
- Установка сосудистого доступа у любого пациента не более 10 сек;
- Стабильность и надежность у пациентов с резким ухудшением состояния или остановкой сердца;
- Скорость доставки препаратов эквивалента центральному венозному доступу, даже у пациентов при СЛР;
- Относительно безболезненная установка, боль эквивалентна установке периферического внутривенного катетера без местной анестезии;
- Через внутрикостный катетер возможна инфузия любых препаратов, жидкостей или компонентов крови;
- Используется в отделениях реанимации по всему миру;
- Идеально для использования в госпитале во время транспортировки;
- Легко может быть установлено медсестрой при потере сосудистого доступа у пациента и немедленной необходимости продолжения инфузии препарата;
- Может быть использован анестезиологом перед операцией у детей, в случае трудной установке периферического катетера или во время операции при утере сосудистого доступа;
- Очень низкая частота осложнений, особенно по сравнению с центральными катетерами;
- Цена, время установки и дискомфорт пациента при использовании EZ-IO меньше, чем при установке центрального катетера.

СИСТЕМА ВНУТРИКОСТНОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА EZ-IO

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинские состояния, когда требуется немедленный сосудистый доступ, а обеспечение стандартного в/в доступа невозможно, в том числе:

- Нарушения сознания;
- Остановка сердца;
- Аритмии;
- Ожоги;
- Дегидратация;
- Травмы;
- Гипотензия;
- Остановка дыхания;
- Эпилептический приступ;
- Шок.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Инфекционный процесс на месте установки;
- Переломы целевых костей;
- Ранее проведенные обширные хирургические вмешательства или манипуляции, протезирование конечности или сустава;
- Применение внутрикостного катетера на этой кости в предшествующие 48 часов;
- Чрезмерная толщина мягких тканей (тяжелое ожирение) и/или отсутствие адекватных анатомических ориентиров.

Запрещается применение системы EZ-IO для установки в грудине!



г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017
Altarim.ru
info@altarim.ru
8(8332)46-41-31

СИСТЕМА ВНУТРИКОСТНОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА EZ-IO

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРАЙВЕРА EZ-IO

- Как и в случае любых устройств, применяемых для оказания неотложной медицинской помощи, настоятельно рекомендуется постоянное наличие запасного устройства;
- Ожидаемый срок службы и приблизительное количество установок будут зависеть от нескольких факторов: фактического использования, плотности кости, длительности выполнения процедуры установки, условий хранения и частоты тестирования драйвера;
- Не прилагайте чрезмерных усилий при установке. Позвольте драйверу EZ-IO выполнить свою работу;
- LED индикатор драйвера EZ-IO горит зеленым цветом, когда активирован пуск, а батарея драйвера имеет достаточный заряд;
- LED индикатор драйвера EZ-IO мигает красным цветом, когда активирован пуск, а батарея драйвера заряжена лишь на 10%;
- Замените драйвер EZ-IO, если LED индикатор начал мигать красным цветом;
- В случае неисправности драйвера отсоедините его, захватите канюлю иглы рукой и вращательными движениями введите ее в костномозговую полость.

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВНУТРИКОСТНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

